

Bruksanvisning för cellprov

Provtagaren borde vara veterinär. Veterinären borde också identifiera djuret och verifiera identifikationen av djuret med sin underskrift.

1. Fasta djuret i 2 timmar före provtagningen så att provet inte skall kontamineras med DNA av annat ursprung.
2. Gnid kraftigt kindens slemhinna i ca 15 sekunder för att försäkra att en tillräcklig mängd celler ska fastna på provtagningspinnen.
3. Ta alltid två prover. Gentestet kan inte utföras om provtagningspinnen inte har tillräckligt med genetiskt material.
4. Torka provtagningspinnarna i åtminstone två timmar efter användning. För mycket fukt kan förstöra provet under transport.
5. Placera provtagningspinnen i transportröret, märk djurets identifiering på röret och skicka provet samma dag

Ifall övriga frågor uppkommer angående provtagning, vänligen kontakta oss.